


Smokerlyzer®

Kurzanleitung

Für piCO, piCO^{baby} und Micro⁺

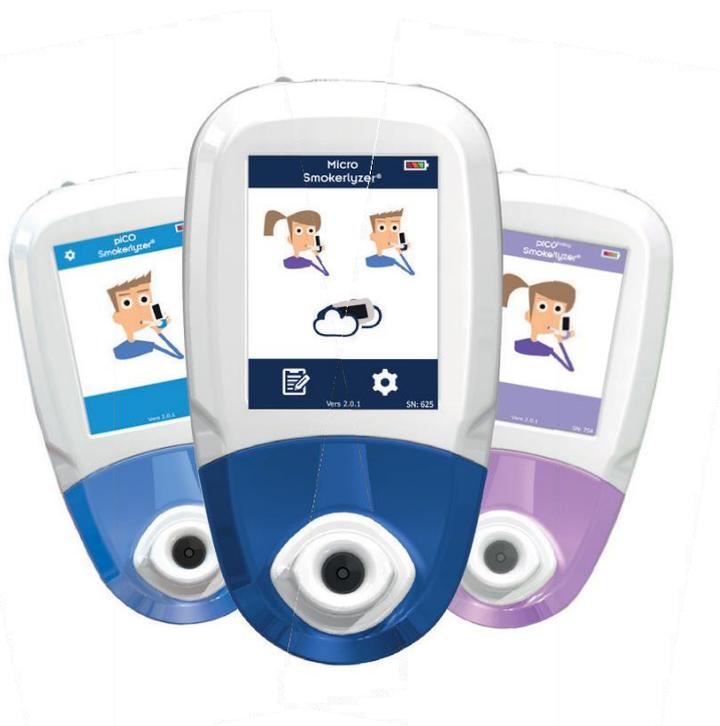

AKYmedical plus
Innovative Medizintechnik
Finkenberger Weg 24a
58256 Ennepetal

Tel.: +49 (0)2333 974 444

Fax: +49 (0)2333 974 445

info@akymedicalplus.de

CE
0086

bedfont

ISO
ISO 9001:2008
Cert.No. FM 31664
ISO 13485:2003
Cert.No. MD 502905

Einen Atemtest durchführen

1. Setzen Sie ein sauberes D-Stück und ein neues Steribreath™ Mundstück ins Gerät ein.
2. Schalten Sie den Monitor an, indem Sie einmal die Einschalttaste drücken.
3. Drücken Sie auf das Symbol „Atemtest“ auf dem Bildschirm, .
4. Wenn Sie den Atemtest abbrechen möchten, drücken Sie .
5. Atmen Sie ein und halten Sie die Luft während des voreingestellten Countdowns von 15 Sekunden an.
6. Während der letzten drei Sekunden des Countdowns ist ein Piepton zu hören.
7. Blasen Sie langsam in das Mundstück und versuchen Sie, die Lunge vollständig zu leeren.
8. Das ppm- und die entsprechenden %CO-Hb- und/ oder %fCO-Hb-Pegel steigen und werden auf dem Bildschirm festgehalten.
9. Wenn der Test abgeschlossen ist, wird auf dem piCO und piCO baby  unten auf dem Bildschirm angezeigt.
Wenn der Test abgeschlossen ist, wird auf dem Micro⁺  unten auf dem Bildschirm angezeigt.
10. Wenn die Messung aufgezeichnet wurde, können Sie den Summer stummschalten, indem Sie  drücken.
11. Um den Test zu wiederholen, drücken Sie  einmal, sodass Sie zum Home-Bildschirm zurückkehren; wiederholen Sie nun die Schritte 3-8.
12. Um die Messung zu speichern (nur Micro⁺), drücken Sie  und wählen Sie das relevante Profil.
13. Entfernen Sie das D-Stück, sodass der Sensor mit frischer Luft versorgt wird.
14. Halten Sie zum Abschalten die Einschalttaste 3 Sekunden lang gedrückt; die Einheit schaltet außerdem nach einer Inaktivität von 2 Minuten ab und spart so Energie.

Smokerlyzer Bedienungsanleitung und Software finden Sie unter www.akymedicalplus.de zum Download.

VERBRAUCHSMATERIAL



D - Stücke oval

Zur Verwendung mit piCO+, Micro+, Gastro+, ToxCO

Das D-Stück beinhaltet ein Einweg-Ventil, damit keine Luft aus dem Monitor eingeatmet werden kann. Zusätzlich ist ein Bakterienfilter eingebaut mit einer Kreuz-Kontaminationsreduktion von >99.9%. Damit wird zusätzlich das Gerät vor Kontamination geschützt.

Passend dazu SteriBreath Einweg Mundstücke.

VE 12 Stück



SteriBreath Einweg Mundstücke

Zur Verwendung mit allen Bedfont Produkten mit ovalen D-Stücken

Die neuen Steribreath Mundstücke sind aus Kunststoff und einzeln hygienisch verpackt. Dadurch können sie innen in das D-Stück gesteckt werden ohne vorher direkt berührt werden zu müssen. Eine eindeutige Verbesserung aus Sicht der Hygiene.

VE 250 Stück



Gerätereinigungstücher „Wipe“ - alkoholfrei

Zur Verwendung mit allen Bedfont Produkten

Alkohol- und chlorfreies Geräte- und Händereinigungstuch speziell für die Verwendung mit Bedfont Atemtestgeräten. Alkohol oder Reinigungsmittel, die Alkohol enthalten, sollten niemals verwendet werden, da sie den Sensor im Gerät schädigen können und die Messungen/Geräte beeinflussen.

VE 100 Stück



Kalibrierungsgase

Kalibrations-Kit (Flasche mit Druckminderer und Schlauch)

Ersatzflasche 12 bar

20 ppm CO

50 ppm CO